

		Seriengrößen Rundstrick (ohne Naht)													
Umfang		I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus	VII	VII Plus
cG		43-48	43-55	45-51	45-59	49-55	49-63	53-59	53-66	57-63	57-69	61-66	61-72	64-69	64-75
cF		39-43	39-49	41-46	41-52	44-49	44-55	47-52	47-58	50-55	50-61	53-58	53-64	56-61	56-67
cE		30-34	30-37	33-37	33-39	35-39	35-41	38-41	38-44	40-44	40-46	42-46	42-48	44-48	44-52
cD		28-30	28-34	30-34	30-36	32-36	32-38	34-38	34-41	36-41	36-43	38-43	38-45	40-45	40-49
cC		29-33	29-35	31-35	31-37	33-37	33-39	35-39	35-42	37-42	37-45	39-45	39-47	41-48	41-52
cB ¹		24-26	24-26	26-28	26-28	28-30	28-30	30-33	30-33	32-35	32-35	34-37	34-37	36-39	36-39
cB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-28	26-28	28-30	28-30	30-32	30-32
cY		26-31	26-31	28-33	28-33	29-34	29-34	31-36	31-36	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41
cA		17-21	17-21	19-23	19-23	21-25	21-25	23-27	23-27	25-29	25-29	27-31	27-31	29-33	29-33

Alle Angaben in cm



☎ **0461 / 978 999-200**
 @ bestellung@schiebler.de
 📠 **Fax 0461 / 978 999-111**

HIGH QUALITY

 MADE IN GERMANY



Fußlängen	
klein	Schuhgröße 36 / 37
normal	Schuhgröße 38 - 40
groß	Schuhgröße 41 / 42
Hosenteillängen	
kurz	bis 28
normal	30 - 32
lang	über 34

Beinlängen	KKL	AD	AG	AT
Veni	1			
Veni Dur	2			
Venex Micro Light	1	kurz 33 - 37	kurz 57 - 67	kurz 65 - 75
Venex Dur Micro Light	2	normal 38 - 43	normal 68 - 80	normal 76 - 85
Venesso Soft	2	lang 44 - 48	lang 81 - 90	lang 86 - 93
Doktus	2	kurz 33 - 37	kurz 60 - 67	kurz 68 - 75
Star Cotton	2	normal 38 - 42	normal 68 - 75	normal 76 - 83
		lang 43 - 46	lang 76 - 82	lang 84 - 90
Doktus Dur	3	kurz 33 - 37	kurz 62 - 67	kurz 68 - 74
		normal 38 - 41	normal 68 - 73	normal 75 - 82
		lang 42 - 45	lang 74 - 80	lang 83 - 88

Die optimale Passform des Strumpfes oder der Strumpfhose am Bein ist eine entscheidende Voraussetzung für den medizinischen Erfolg am Patienten. Fachgerecht angemessene Strümpfe sorgen für den medizinisch korrekten Druckverlauf und verbessern die Akzeptanz der Kompressionstherapie beim Patienten. Um Ihnen das richtige Maßnehmen zu erleichtern, haben wir hier in aller Kürze die wesentlichen Kriterien zusammengefasst*.


Messen Sie bitte am unbekleideten, ödemfreien Bein (bei einer Fingerdruckprobe im Fesselbereich darf keine Delle durch Wasseransammlungen bleiben). Die Maßnahme erfolgt möglichst morgens am unbelasteten Bein oder nach Abnahme des Druckverbandes.

Das Messen sollte am stehenden Bein erfolgen, mit möglichst **im 90°-Winkel positionierten Fuß**. Das Bein ist entspannt, das Maßband liegt eng und ohne zusätzlichen Zug an.

Messen Sie bitte von **unten nach oben**. Ermitteln Sie **zuerst die Umfangsmaße** und markieren Sie mit einem Hautstift die entsprechenden Messpunkte. Die **Längenmaße** ermitteln Sie dann anhand dieser markierten Stellen.

Messpunkte und Erläuterungen

Bezeichnungen und Kürzel gemäß RAL

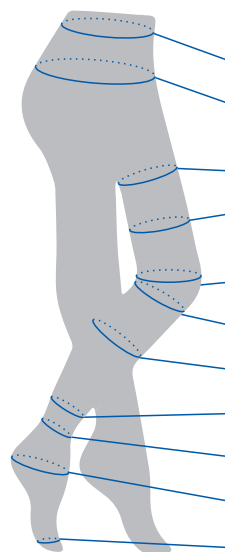

Messpunkt	Umfang (c = circumference)	Länge (l = length)
T	cT Taille	lT Ferse bis Messpunkt cT
H	cH Hüfte (breiteste Stelle)	
G	cG Ende Oberschenkel zwei Finger breit unter dem Schritt	lG Ferse bis Messpunkt cG
F	cF etwa Mitte Oberschenkel	lF Ferse bis Messpunkt cF
E	cE Kniescheibe-Kniekehle Knie leicht gebeugt	lE Ferse bis Messpunkt cE
D	cD zwei Finger breit unter der Kniekehle	lD Ferse bis Messpunkt cD
C	cC größter Wadenumfang	lC Ferse bis Messpunkt cC
B ₁	cB ₁ Umgang Wadenansatz	lB ₁ Ferse bis Messpunkt cB ₁
B	cB Fessel (geringster Beinumfang)	lB Ferse bis Messpunkt cB
Y	cY Ferse-Spann (Fuß im 90° Winkel)	
A	cA am Zehenansatz der kleinen Zehe	lA Ferse bis Messpunkt cA (Fußlänge)
Z		lZ Ferse bis Großzeh (Gesamtfußlänge)

Unsere Qualitäten

Veni (KKL 1 und 2, KKL3 nur in Maß)

Unsere feinste Kompressionsstrumpf-Eleganz

Modisch elegant und komfortabel zugleich – lassen Sie sich überraschen! Feinste Maschentransparenz sorgt für höchstes Tragegefühl und vollendete Optik. Ein Kompressionsstrumpf so richtig zum Wohlfühlen: optimal gekleidet für Ihren ganz persönlichen Auftritt!

Venex Micro Light (KKL 1 und 2)

besonders atmungsaktiv dank Mikrofaser

Höchster Tragekomfort durch hochmoderne Garntechnologie. Angenehm weich im Tragegefühl und bestechende Passform. Durch Verwendung mikrofeiner Hightechfäden verbesserter Luftaustausch. Angenehm softig weiches Tragegefühl und perfekter Sitzkomfort. Unser Kompressionsstrumpf für „Klimafrische“!

Venesso Soft (KKL 2)

wunderschön weich und traumhaft anzuziehen

Ein Kompressionsstrumpf mit einer ganz besonderen An- und Ausziehcharakteristik. Er ist besonders weichelastisch und schmiegt sich der Figur wie eine zweite Haut an. Perfekte Passform ist garantiert – ein Strumpf, der keine Wünsche offen lässt.

Doktus ohne Naht (KKL 2 und 3)

kräftiger Kompressionsstrumpf für den ganzen Tag

Doktus, das heißt hohe Strapazierfähigkeit und zuverlässige Druckwirkung zur Behandlung mittlerer und schwerer Indikationen. Der nahtlose Kompressionsstrumpf ist dennoch hochelastisch und dank seinem Träger durch perfekten Sitz und Formstabilität den ganzen Tag. Kompression ohne Einschränkungen, kompromisslos und hochwirksam.

Star Cotton (KKL 2)

hautfreundlich mit hohem Baumwollanteil

Ein Kompressionsstrumpf nicht nur für Freunde hautfreundlicher Naturfasern. Hier wird Ihre Haut durch besonders veredelte und hochwertige Baumwollfäden verwöhnt und auf Ihrer Haut liegt zu 100% Baumwolle auf. Strapazierfähig auch bei hoher körperlicher Belastung. Star Cotton – Kompression vereint mit Garnen der Natur.

* Bedenken Sie bitte, dass dieses Infoblatt nicht die fachkundige Schulung des maßnehmenden Personals ersetzen kann.